








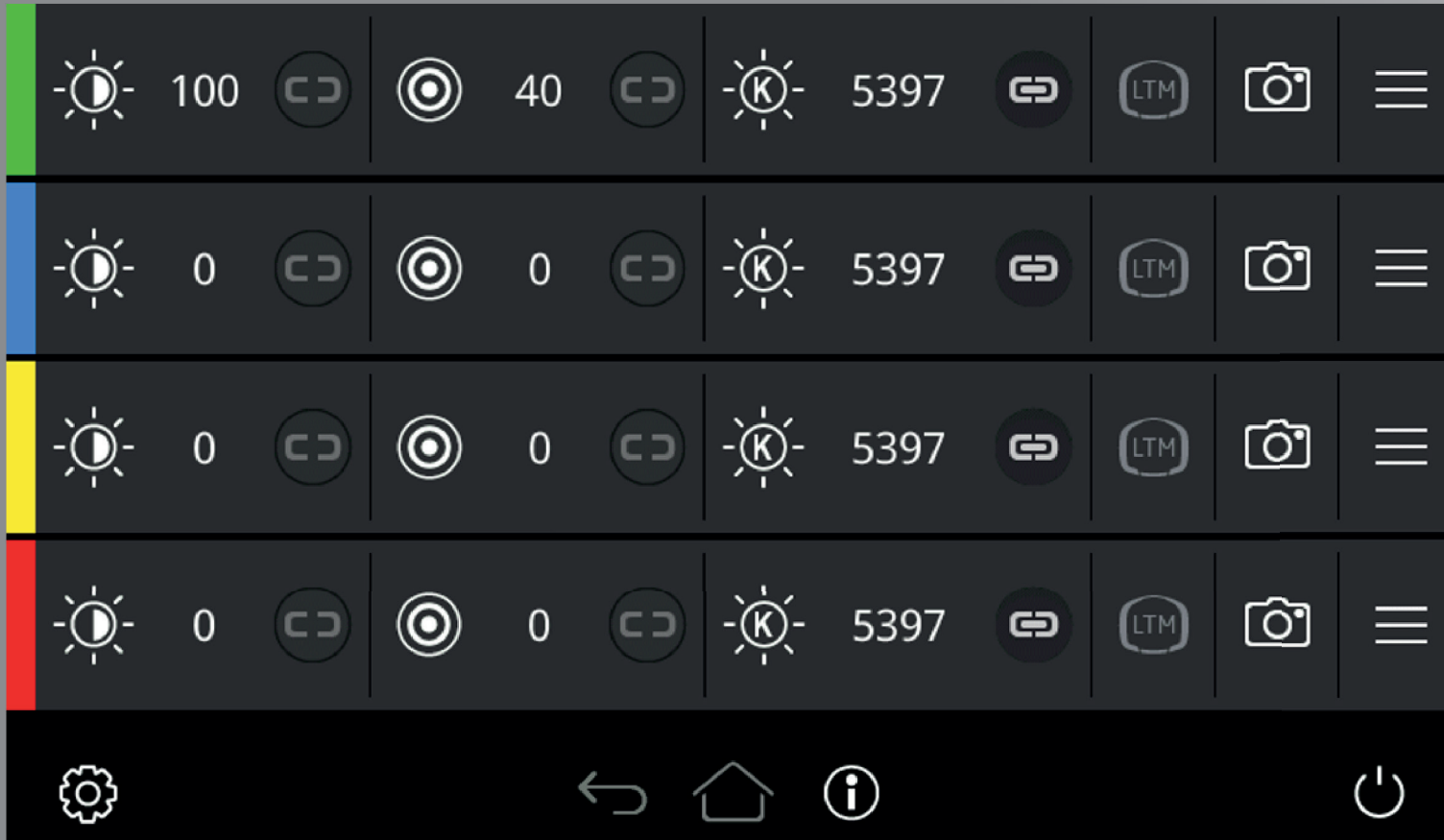


Kurzanleitung marTouch® Pro



-  Leuchtenposition 1-4
-  Beleuchtungsstärke einstellen
-  Leuchtfeldgröße einstellen
-  Farbtemperatur einstellen
-  Leuchten-synchronisation
-  LTM-Expertenfunktion
-  Kamerafunktion für Live- oder Standbild
-  Sonderfunktionen
-  Genauere Informationen zur aktuell ausgewählten Funktion

Expertenfunktionen

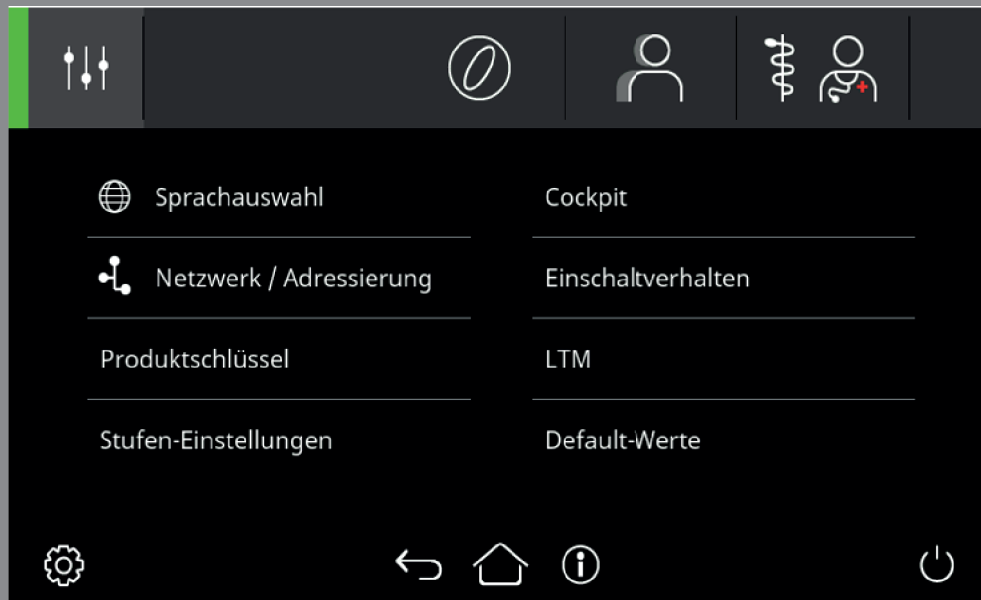

Sonderfunktionen wählen.



Leuchtfeldgeometrie, durch Antippen on / off, durch Ziehen kann ovales Leuchtfeld rotiert werden.



Active Shadow Management, durch Antippen on / off, sorgt automatisch für genügend Licht.



Anwenderspezifische Einstellungen, durch Antippen des Symbols.

Sonderfunktionen

Sprachauswahl

Verfügbare Sprachen, ausgewählte ist farblich markiert.

Netzwerk / Adressierung

Verfügbare Netzwerkpartner, bis zu 4 möglich, Symbol um Name zu ändern.

Produktschlüssel

Um Optionspakete freizuschalten.

Stufen-Einstellung

Für die Beleuchtungsstärke, Leuchtfeld und Farbtemperatur Sensibilitätsstufen einstellen.

Cockpit

Aktivieren um nach festgelegter Zeit ohne Bedienaktion zum Cockpit zurück zu gelangen.

Einschaltverhalten

Zwei Einschaltvarianten:

- zuletzt gewählter Zustand
- definierbare Default-Werte

LTM

LTM-Modus um individuell Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur einzustellen.

Default-Werte

Defaultwerte einstellen und individuell festlegen.